



Før du går i gang med WebQuality

Fiktivt CPR-nummer – kontrollér at der er adgang til WebQuality med det fiktive CPR-nummer

Gå i WebReq med det fiktive CPR-nummer. Det fiktive CPR-nummer, der skal anvendes til WebQuality fremgår af hjælpeskemaet. Fornavn og efternavn skal altid være angivet til hhv. Laboratoriekonsulent og WebQuality, og må ikke ændres.

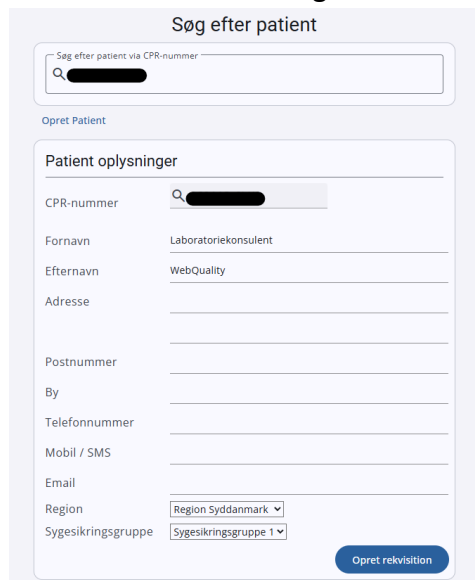

Klik på **Opret rekvisition** og kontrollér der er adgang til WebQuality:

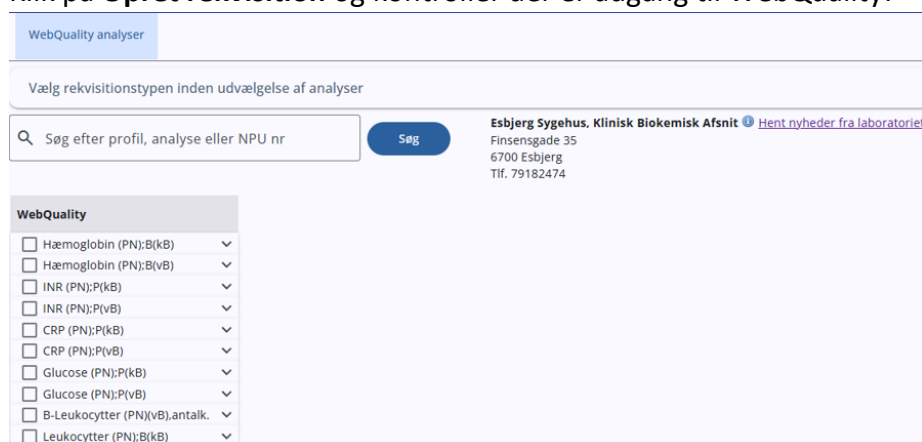

Udbyder af lægesystem eller laboratoriekonsulent kontaktes ved problemer.

Hjælpeskema

Der er udleveret et hjælpeskema udelukkende til brug i praksis. Kontrollér at apparaterne på skemaet, svarer til apparaterne i praksis. Skemaet anvendes til ajourføring af udførelse af parallelkontrol. Laboratoriekonsulenterne skal have besked, hvis der er ændringer vedr. apparater.

Apparater mærkes

På hjælpeskemaet ses hvilket apparatnummer praksis' apparater er tildelt. Apparaterne skal mærkes med dette nummer fx med Dymo.

Fremgangsmåde til udførelse af parallelkontrol

Prøvetagning

- Blodprøver, der anvendes til parallelkontrol, udtages fra en tilfældig patient, der i forvejen skal have taget blodprøve(r), og som samtykker til at der må tages ekstra blodprøver til kvalitetskontrol af apparatur.
- Udtag **kapillærprøve** eller **veneprobe** på patient til analysering på apparatur i praksis, samtidig tages veneprobe til parallelkontrol på laboratoriet på samme patient.
Vær opmærksom på hvilken rørtype, der kræves til parallelkontrol på laboratoriet:

Analyse	Prøvemateriale i praksis	Prøvemateriale til laboratoriet
Glukose	Rør med LILLA prop* eller kapillærblod	Rør med PINK prop
CRP	Rør med LILLA prop eller kapillærblod	Rør med LGRØN prop
HB/LKC	Rør med LILLA prop eller kapillærblod	Rør med LILLA prop
KFTT	Kapillærblod fra finger	Rør med BLÅ prop

*Ved Accu-Chek Inform II anvendes rør med MØRKEGRØN prop.

- Udfør analysen (på kapillær- eller veneblod) på apparatur i praksis.
- Noter resultat/er på hjælpeskema udfor apparat og måned.

Bestilling

- Hvis praksis har flere ydernumre, skal parallelkontrol bestilles i det ydernummer, der fremgår af hjælpeskemaet.
- I WebReq indtastes det fiktive CPR-nummer, som fremgår af hjælpeskemaet.

Opret Patient

Patient oplysninger

CPR-nummer [Redacted]

Fornavn Laboratiekonsulent

Efternavn WebQuality

Adresse

- Klik på **Opret rekvisition**

- Bestil de ønskede analyser. Der skelnes ikke mellem kapillærblod (kB) og veneblod (vB), det vil sige, det er tilladt at anvende veneblod til en analyse bestilt som kapillærblod og omvendt.

Der kan max. bestilles nedenstående analyser på én PTB:

WebQuality		
☒	Hæmoglobin (PN);B(kB)	▼
☒	Hæmoglobin (PN);B(vB)	▼
☒	INR (PN);P(kB)	▼
☒	INR (PN);P(vB)	▼
☒	CRP (PN);P(kB)	▼
☒	CRP (PN);P(vB)	▼
☒	Glucose (PN);P(kB)	▼
☒	Glucose (PN);P(vB)	▼
☒	B-Leukocytter (PN)(vB),antalk.	▼
☒	Leukocytter (PN);B(kB)	▼

- Klik på **Udfør**.
- Indtast/vælg de nødvendige oplysninger i WebQuality:
Analyseresultat: Indtast det målte analyseresultat.
Anvendt apparatur: Vælg det anvendte apparatur i rullemenuen.
Anvendt apparaturnr: Vælg det apparaturnummer i rullemenuen, som apparatet er mærket med.

Apparater i praksis skal være mærket med det nummer, som fremgår af hjælpeskemaet. Det er vigtigt at vælge det korrekte anvendte apparatur og apparaturnummer i WebQuality.

Rekvissionsoplysninger

Prøvetagningstid

02-02-2026
09:13

Analyseresultat (Hæmoglobin (PN);B(kB)) *

talværdi *
9,0

Anvendt apparatur (Hæmoglobin apparaturtype;B(kB)) *

HemoCuHb201+

Anvendt apparaturnr. (Hæmoglobin apparaturnr.;B(kB)) *

Apparatnr. 1

- Nedenstående felter må ikke anvendes

Reitereringer og interval (dage)	Antal reiter... ▼ ✕	Interval (dag) ✕
Rekvisitionskommentar		
Information til prøvetager		

- Klik på **Udfør** og **Udskriv** for at udskrive prøvetagningsblanket (PTB).
- Veneprøve(r) til parallelkontrol på laboratoriet mærkes med etikette(r) fra PTB'en og indsendes til laboratoriet på samme måde som patientprøver.
- Husk at afkrydse/notere analysen i hjælpeskemaet (apparat/måned) for at sikre parallelkontrol er udført jf. gældende regler. Se eksempel nedenfor for januar 2026.

Gældende for: 2026

Analyse	App. navn	App. Nr.	Jan	Feb	Marts
Hæmoglobin	QuikRead GO	1	9,0		
CRP 50% af resultaterne skal være ≥ 15 mg/L, 3 stk. pr. ½-år	QuikRead GO	1	18		
Hæmoglobin	QuikRead GO	2	10,1		
CRP 50% af resultaterne skal være ≥ 15 mg/L, 3 stk. pr. ½-år	QuikRead GO	2	15		
Hæmoglobin	HemoCue 201+	3	8,7		
Glukose	HemoCue 201+	1	5,4		

Kvalitetsvurdering

- Laboratoriekonsulenterne kvalitetsvurderer parallelkontrollerne elektronisk.
- Praksis modtager resultater på og oplysninger om parallelkontrol i lægesystemet på det fiktive CPR-nummer (laboratorie- og praksisresultat, ratio, apparaturtype og -nummer). Ratioen anvendes til kvalitetsvurdering, se skema nedenfor.
- Praksis modtager brev fra laboratoriekonsulenterne, hvis der i en kalendermåned er manglende og/eller ikke tilfredsstillende kontroller. Brevet skal returneres til laboratoriekonsulenterne med relevante oplysninger. Det vil fremgå af brevet, hvilke oplysninger, der er nødvendige.
- Hvis svar på parallelkontroller ikke kan ses i lægesystemet, skal udbyderen af lægesystemet kontaktes for at oprette relevante koder, så praksis kan modtage svar.
- Husk;
 - der skal udføres parallelkontrol min. 1 gang hver kalendermåned pr. analyse pr. apparat.
 - at give laboratoriekonsulenterne besked, hvis apparater udskiftes/anskaffes/nedlægges.

Analyse	Ratio	$\frac{\text{praksisresultat}}{\text{laboratorieresultat}} = \text{Ratioværdi}$
Glukose	<0,82	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
	0,82-0,88	Mindre tilfredsstillende
	0,89-1,11	Tilfredsstillende
	1,12-1,18	Mindre tilfredsstillende
	>1,18	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
Hæmoglobin	<0,84	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
	0,84-0,88	Mindre tilfredsstillende
	0,89-1,11	Tilfredsstillende
	1,12-1,16	Mindre tilfredsstillende
	>1,16	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
CRP	<0,59	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
	0,59-0,67	Mindre tilfredsstillende
	0,68-1,32	Tilfredsstillende
	1,33-1,41	Mindre tilfredsstillende
	>1,41	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
INR	<0,74	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
	0,74-0,79	Mindre tilfredsstillende
	0,80-1,20	Tilfredsstillende
	1,21-1,26	Mindre tilfredsstillende
	>1,26	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
Leukocytter	<0,68	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol
	0,68-0,74	Mindre tilfredsstillende
	0,75-1,25	Tilfredsstillende
	1,26-1,32	Mindre tilfredsstillende
	>1,32	Ikke tilfredsstillende, udfør ny kontrol